



**REUTILIZABLE
Y LAVABLE**



BATA HIGIÉNICA AZUL ROYAL (4 UNIDADES)

Bata higiénica Novotex, cubierta por delante y por detrás. Ajuste con cinturón y ribete en cuello, puños engomados.

Producto reutilizable y lavable.



FABRICADO EN ESPAÑA



8434120052205

Karme Nature, S.L. - Pol. Ind. El Pi

Avda. Francisco Vitoria Laporta, 8 03830 - Muro de Alcoy (Alicante)

RETIRADA DE LA BATA

Para evitar la contaminación al retirar una bata, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la bata sin tocar la parte exterior.
4. Colocar la bata en caso de desechar en un recipiente específico.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco y bien ventilado. No almacenar cerca de fuentes de calor y se debe mantener alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y agentes oxidantes.

ELIMINACIÓN DE LA BATA

Esta bata es reutilizable. Para reducir los riesgos del uso de estas batas se debe desechar una vez sobrepasado los 5 lavados.

LAVADO Y SECADO DE LA BATA

- Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente habitual, a una temperatura de lavado de 60°C.
- Se recomienda poner la bata en una bolsa protectora de lavadora para que la fricción no desgaste el tejido de la bata.
- Se debe evitar el contacto entre una bata sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las batas sucias.
- No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.
- Se recomienda que la bata se seque completamente dentro de las 2h posteriores al lavado.
- No se debe secar o higienizar con un horno microondas.
- Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la bata, se deben evitar los ambientes en los que la bata se pueda volver a contaminar.
- Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la bata, desecharla (menor ajuste, deformación, desgaste...).
- No seguir estas recomendaciones puede favorecer a la pérdida de eficacia de la bata.

DESECHAR LA BATA

Las batas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual y en contenedores para desechos biológicos). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.