

1  
ud



# MASCARILLA HIGIÉNICA AUTOMONTABLE ADULTO 3 CAPAS


Mascarilla higiénica automontable adulto 3 capas y elástico de sujeción en ambos lados, destinada a minimizar los contactos infecciosos.

Fabricada con dos capas exteriores de **Novotex®** (*Spunbonded*) blanco y turquesa y una intermedia de **Air Soft®** (*Air Laid* o tisú seco) blanco, que trabaja como filtro. Adaptable gracias a sus tres hendiduras para una perfecta sujeción a las orejas. **No reutilizable.**

 turquesa  
 blanco

 3 capas

  
TALLA ÚNICA

  
65% POLIPROPILENO  
35% TISÚ SECO

UNE 0064-1\_2020

FABRICADO EN ESPAÑA



Karme Nature, S.L. - Pol. Ind. El Pi  
Avda. Francisco Vitoria Laporta, 8 03830 - Muro de Alcoy (Alicante)

## ADVERTENCIA

Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.

## GENERALIDADES

La mascarilla higiénica no exige al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

**NOTA:** Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

## ENSAYO

Ensayo*	2020TM0400
Eficiencia de filtración bacteriana	96,15
Presión diferencial Pa/cm2	55

\*Ensayos realizados por la asociación de investigación de la industria textil AITEX.

## DIMENSIONES


### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Ancho (cm) total +0,5	22
Alto (cm) zona frontal +0,5	18
Gramaje <b>Novotex</b> ® (g/m2) +2	55
Gramaje <b>Air Soft</b> ® (g/m2) +5	60
Peso mascarilla sin embolsar (gr)	8

## MONTAJE DE LA MASCARILLA

Para una correcta eficacia hay que seguir los siguientes pasos de montaje de la mascarilla:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Abrir el paquete y separar 2 gomas elásticas y 3 capas de tejido en el siguiente orden: turquesa, blanco, blanco (no cambiar este orden).
3. Poner la capa turquesa boca abajo.
4. Insertar la goma en el agujero más cercano a la esquina e ir pasando la goma por todos los agujeros hasta llegar a la otra esquina.
5. Hacer el mismo paso con la otra goma en el lado opuesto.
6. Atar los dos extremos de la misma goma (ajustando a la morfología de la cara para un óptimo ajuste).
7. En caso de no ajustar correctamente desatar el nudo, ajustar y volver a atar.

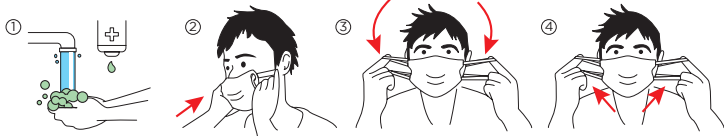

## COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y ajustar mediante las hendiduras de los extremos en ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla y la nariz.
7. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

## RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Colocar la mascarilla en caso de desechar en un recipiente específico.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

## USOS

Esta mascarilla es de uso personal y no reutilizable, para reducir riesgos las mascarillas de deben desechar después de cada uso.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco y bien ventilado. No almacenar cerca de fuentes de calor y alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y agentes oxidantes.

## DESECHAR LA MASCARILLA

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

## USO MÁXIMO RECOMENDADO

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h. En caso de que se sudezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva.

Durante el mismo período de 4h, la mascarilla solo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con las instrucciones, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.