

## FICHA TECNICA

## MASCARILLA FFP2



### INFORMACION GENERAL

Color	Negras
Cantidad por caja	50und embolsadas individualmente
Caja Master	1200 unidades

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Nombre	Mascarilla FFP2
Composición	Tela no tejida + tela fundida por soplado + orejeras + cinta para el puente nasal

Eficacia filtración bacteriana    BFE  $\geq$  94%

Tiempo de uso recomendado                      4 horas    NO REUTILIZABLE

### DESCRIPCION

Mascarilla FFP2 con elásticos para sujeción .  
Permite cubrir boca, nariz y mentón proporcionando una barrera que minimiza la transmisión de agentes infecciosos entre personas y que protege contra salpicaduras de líquidos contaminados

**CUMPLE CON LA NORMA**                      **EN 14:2001 + A1:2009**

**Marcado CE:**                                      **2163**

### Instrucciones de uso:

- \* En primer lugar, antes de colocar la mascarilla, es necesario lavarse las manos con gel desinfectante a base de alcohos o bien , con agua y jabón
- \* Posicione la mascarilla en la cara a la altura de la nariz con el ajuste nasal hacia arriba
- \* Ssujete la mascarilla desde el exterior y pase las cintas alrededor de ambas orejas sin cruzarlas
- \* Verifique que la mascarilla cubre la nariz y barbilla. Ajuste la pinza nasal y compruebe que la mascarilla queda ajustada y sin molestias al respirar

